

FAITES LE CHOIX DE LA

vaccination intramusculaire PRÉCISE et EFFICACE



Nobivet

DOUBLE VAX



Nobivet DOUBLE VAX



1 RAPIDE à mettre en œuvre

- Installation rapide,
- Alimentation **électrique** – plus de compresseur d'air, de batteries,
- **Précision** de la vaccination **optimisée** - l'aide au **bon positionnement de la poulette** via l'écran,
- Positionnement de la **seringue** ajustable,
- Mise en place et remplacement facile de l'**aiguille** (système breveté).

2 FIABLE

- Détecte, à l'aide de ses capteurs, **les bulles d'air** évitant ainsi la réalisation de fausses injections,
- Répond aux exigences de la **certification CE**,
- Munie d'un :
 - **indicateur** de libération anticipée indiquant une vaccination **incomplète**
 - **compteur de flacons et d'injections** permettant un **suivi** de l'utilisation des vaccins.
- Manipulations sur la machine **sécurisées**.

TECHNOLOGIQUE

- Capteurs tactiles précis et écran de contrôle LED tactile permettant d'accéder à **toutes les fonctions** de la machine,
- Nouveau concept de valve qui évite **les fuites**, même avec des vaccins à faible viscosité.

Vaccination PRÉCISE


- Moules adaptés aux bréchets des **poulettes** et des **reproducteurs**,
- **Positionnement idéal** de la poulette,
- **Réglage** de la course du piston garantissant la précision du dosage,
- Dose à injecter **précise** grâce à des seringues calibrées en usine.

FACILE d'entretien

- **Se nettoie facilement** : moins de tubes, d'interrupteurs et de pièces pour plus d'hygiène.




3

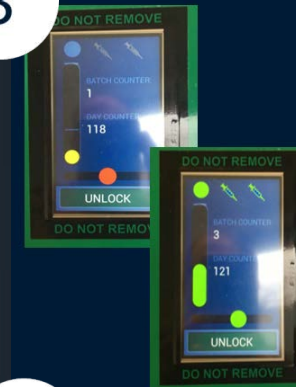

4



5

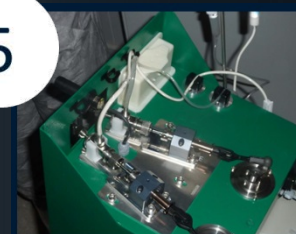

Nobivet DOUBLE VAX


FABRIQUÉ PAR HSW

LOGISTIQUE : SERVIPHAR

MAINTENANCE : MSD SANTÉ ANIMALE



L'administration d'une **dose complète et précise**, au **bon point d'injection** sur la poulette tout en respectant les **conditions d'hygiène et de sécurité** est désormais **POSSIBLE !**

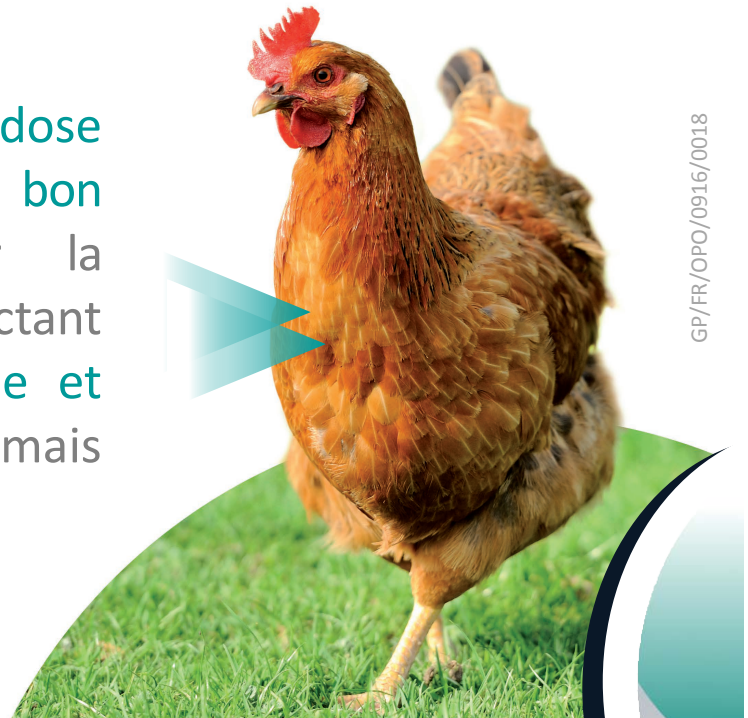

GP/FR/OPC/0916/0018